

Töltényadagoló

800004, 003. változat

Használati utasítás

Javallatok:

A NovaBone Dental Putty töltényadagoló kizárólag a NovaBone Dental Putty töltényekkel használható. A töltények külön kaphatók, csontpótló anyaggal előzetesen feltöltve.



(3a) Helyes

(3b) Helytelen

(4)

Használati utasítás:

1. Vegye ki a tartóból a töltényt.
2. Tolja be a töltényt az adagolóba, amíg a helyére nem záródik.
3. Igazítsa a fekete műanyag dugattyút és rugót a markolókar alsó részén található támasztékhoz, a markolaton található nyíl által jelzett módon. **MEGJEGYZÉS: Ne** a markolaton lévő rövid támasztékhoz igazítsa (a 3b. ábrán látható módon), mivel ebben a helyzetben a markolat nem záródik és nem működik megfelelően.
4. Vegye le a töltényről a kis fekete kupakot.
5. Lassú, folyamatos nyomást gyakorolva nyomja be a markolatot a csontpótló gitt kinyomásához.
6. Használat után vegye ki és dobja ki a töltényt.

Sterilizálás:

A töltényadagolót nem steril állapotban szállítják, és használat előtt sterilizálni kell azt. Az adagoló sterilizálható autoklávban vagy legfeljebb 140° C (285° F) hőmérsékleten, illetve hideg, folyadékos sterilizálással. A tisztítási és sterilizálási utasítások alább találhatók.

Ellenjavallatok / Óvintézkedések / Figyelmeztetések:

Lásd a töltényhez mellékelt NovaBone Dental Putty használati utasításokat.

Óvatosság:

Az Egyesült Államok szövetségi törvényei alapján az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

Tisztítási és sterilizálási utasítások

Tisztítás:

Használat után a fogászati széknel törölje le a töltényadagolóról a fölösleges anyagot és rárakódást.

1. módszer: Az egység szétszedéséhez húzza felfele a hátsó kart, így kivéheti a fekete dugattyút. Vegye ki a dugattyúból a fém rugót, és helyezze mindhárom alkatrészt (markolat, dugattyú és rugó) egy ultrahangos tisztítóba. Fedje le és tisztítsa 16-20 percig (50° C/122° F hőmérsékleten, ha az egység melegíthető). Vegye ki az alkatrészeket, és öblítse át azokat alaposan steril, meleg édesvízzel (ásványmentesített vizet is használhat) Rázza le az alkatrészekről a vizet, és függőleges helyzetbe állítva hagyja a levegőn megszáradni.
2. módszer: A fentiekben ismertetett módon szedje szét az egységet. Kíméletes tisztítószerezrel és puha sörtéjű kefével alaposan dörzsöljön át minden alkatrészt. Vegye ki az alkatrészeket, és öblítse át azokat alaposan steril, meleg édesvízzel (ásványmentesített vizet is használhat) Rázza le az alkatrészekről a vizet, és függőleges helyzetbe állítva hagyja a levegőn megszáradni.

Sterilizálás:

A töltényadagoló teljesen szárazon, összeszerelve sterilizálendő. Tegye vissza a rugót a dugattyúra - a megfelelő összeszerelés érdekében figyeljen arra, hogy a rugón lévő kis hurok a dugattyú hátsó részéhez kerüljön (a megfelelő helyzetet lásd az 1. ábrán).

1. ábra



Ezt követően helyezze be a dugattyút és a rugót az egységbe, amíg a dugattyú hátsó része a hátsó markolat belső részén lévő támasztékhoz kerül (a megfelelő helyzetet lásd a 2. ábrán).

2. ábra



Ha a dugattyú a megfelelő helyzetbe kerül, a markolat szabadon mozog, és használat közben nem szorul be. Ha a dugattyú nem a megfelelő helyzetbe kerül, a markolat csak nagy erőt kifejtve zárható, ami a markolat vagy a dugattyú töréséhez vezethet.

A töltényadagoló autoklávban vagy hideg oldattal sterilizálható.

Sterilizálás autoklávban: A sterilizálást az autokláv gyártójának utasításai alapján végezze; általában 20 perc szükséges 121° C/250° F hőmérsékleten, 15 psi nyomás alatt.

Sterilizálás hideg oldattal: Merítse be az egységet 25° C hőmérsékletű aktivált hideg oldatba úgy, hogy az teljesen elfedje, az edényt fedje le, és végezze a sterilizálást a hideg oldat gyártója által meghatározott ideig. Vegye ki az oldatból az egységet, és öblítse át azt alaposan steril, meleg vízzel (ásványmentesített vizet is használhat) Rázza le az alkatrészekről a felesleges vizet, és függőleges helyzetbe állítva hagyja a levegőn megszáradni.