


카트리지 디스펜서

800004 Rev. 003

사용 지침

적용중:

NovaBone Dental Putty 카트리지 디스펜서는 NovaBone Dental Putty 카트리지와만 사용 가능합니다. 카트리지는 별도로 판매되며 골이식 재료가 미리 충전된 상태로 제공됩니다.

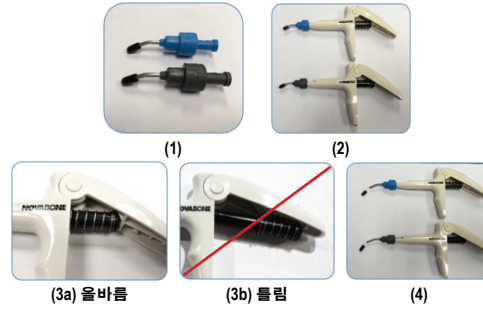

사용 지침:

1. 카트리지를 트레이에서 꺼냅니다.
2. 카트리지를 디스펜서에서 넣고 눌러서 장착되도록 합니다.
3. 검정색 플라스틱 플런저와 스프링을 핸들 레버의 아래쪽에 있는 평면 지지대에 맞춥니다. 이것은 핸들에 인쇄된 화살표로 표시되어 있습니다. 주의: 핸들에 짧은 막대를 그림 3b와 같이 정렬하지 **마십시오**. 이 위치에서는 핸들이 적절하게 닫히거나 작동하지 않기 때문입니다.
4. 카트리지 끝에서 검정색 작은 캡을 제거합니다.
5. 핸들을 천천히 눌러서 골이식용 퍼티를 짜 놓습니다.
6. 사용 후에는 카트리지를 제거해서 폐기하십시오.

멸균성:

카트리지 디스펜서는 비멸균 상태로 제공되며 사용 전에 살균해야 합니다. 디스펜서는 오토클레이브에서, 또는 140°C(285°F)를 초과하지 않는 건열을 사용하거나, 저온의 살균 용액을 사용해서 살균될 수 있습니다. 아래에 청소 및 살균 지침이 있습니다.

금지 사항 / 주의 사항 / 경고:

제공된 상태로 장치 카트리지와 함께 사용하는 방법은 NovaBone Dental Putty 지침을 참조하십시오.

주의:

연방 법(미국)에 따르면 의사의 주문에 따라 이 장치를 판매하도록 제한하고 있습니다.

청소 및 살균 지침

청소:

사용 후에는 의사 쪽에서 카트리지 디스펜서의 남아 있는 재료와 파편을 닦아 내십시오.

방법 1: 뒤쪽 핸들을 들어 올려 장치를 분해해서 검정색 플런저를 제거할 수 있도록 하십시오. 플런저에서 금속 스프링을 제거하고 3개 부품(핸들, 플런저 및 스프링)을 모두 초음파 세척기에 넣으십시오. 커버를 닫고 16-20분간 세척하십시오 (히터가 포함된 경우 50°C/122°F). 장치를 꺼내고 살균된 깨끗한 운수에서 완전히 행구십시오(탈염수 사용 가능). 흔들어서 겉도는 물을 제거하고 수직으로 세워서 자연 건조시키십시오.

방법 2: 위에 설명된 방법으로 장치를 분해하십시오. 연성 세제와 부드러운 브러시를 사용해서 부품을 손으로 완전히 세척하십시오. 장치를 꺼내고 살균된 깨끗한 운수에서 완전히 행구십시오(탈염수 사용 가능). 흔들어서 겉도는 물을 제거하고 수직으로 세워서 자연 건조시키십시오.

살균:

살균하기 전에 카트리지 디스펜서를 완전히 건조시키고 다시 조립해야 합니다. 적절히 조립되도록 작은 스프링 구멍이 플런저 뒤쪽에 있는지 확인하면서 스프링을 플런저로 다시 조립하십시오 (올바른 방법은 사진 1 참조).



사진 1

그 다음에, 플런저 뒷면이 후방 핸들 레버의 아래쪽에 있는 플랫폼의 전면에 올 때까지 플런저와 스프링을 장치로 삽입하십시오(올바른 방법은 그림 2 참조).



사진 2

플런저가 올바른 위치에 있는 경우, 핸들이 자유롭게 움직여야 하며 사용 중에 걸리면 안 됩니다. 플런저가 올바른 위치에 있지 않은 경우, 핸들을 닫기 위해 과도한 힘이 필요하기 때문에 핸들 또는 플런저가 파손될 수 있습니다.

카트리지 디스펜서는 오토클레이브 또는 저온의 살균 용액을 사용하여 살균될 수 있습니다.

오토클레이브 살균: 살균장치 제조업체의 지시에 따라 살균 절차를 진행하십시오. 일반적으로 121°C/250°F - 15 psi 에서 20분이 걸립니다.

살균 용액: 살균 용액 제조업체가 권장하는 시간 동안 25°C에서 투경이 있는 용기에 들어 있는 활성 살균 용액에 장치를 완전히 담그십시오. 장치를 살균 용액에서 꺼내고 깨끗한 운수로 완전히 행구십시오(탈염수 사용 가능). 흔들어서 겉도는 물을 제거하고 수직으로 세워서 자연 건조시키십시오.

제조업체:

NovaBone Products, LLC
 13510 NW US Highway 441
 Alachua, Florida 32615
 전화: (386) 462-7660
 팩스: (386) 418-1636
 www.novabone.com

CE REP

EU 법정 대리인:

Peter Smith
 18 Yeates Close
 Thame, Oxfordshire, OX9 3AR UK