

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pansement de collagène RegenePro^{MC}

STÉRILE

FR-CA :

Utilisation prévue

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} est indiqué pour le traitement des plaies orales, notamment les :

- plaies chirurgicales parodontales
- blessures chirurgicales et lésions traumatiques
- sites de suture
- ulcères buccaux (sans infection ou viraux)
- ulcération prothétique
- brûlures

Description du produit

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} est un pansement de collagène résorbable souple de couleur blanche ou blanc cassé produit à partir de collagène purifié de type I, dérivé de tendon fléchisseur profond (tendon d'Achille) de bovin. La structure épaisse et poreuse du dispositif lui permet d'absorber le sang et les exsudats qui s'écoulent de la plaie. Une fois en position, l'épaisseur du pansement diminuera sous l'effet de l'hydratation.

Mode d'emploi

Sortez le pansement de collagène RegenePro^{MC} de son emballage (pochette ou plateau) à l'aide de gants ou d'instruments stériles.

- La plaie doit être rincée et tout excès de liquide doit être retiré. Le cas échéant, le pansement de collagène RegenePro^{MC} peut être hydraté avec de la solution saline avant application.
- Le pansement de collagène RegenePro^{MC} doit être placé dans ou sur la plaie et maintenu en place jusqu'à ce qu'il adhère parfaitement. Le pansement de collagène RegenePro^{MC} peut être laissé en place; suturez si nécessaire afin de minimiser le mouvement du pansement.
- Le pansement de collagène RegenePro^{MC} peut être remplacé s'il se détache de la plaie prématurément. La décision de remplacer le pansement de collagène RegenePro^{MC} suite à un détachement précoce revient au praticien.

Contre-indications

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} est contre-indiqué chez les patients atteints d'infections aiguës et en ce qui concerne le traitement des plaies contaminées situées dans la cavité buccale.

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} ne doit pas être utilisé chez les patients ayant manifesté une sensibilité ou une allergie aux protéines bovines.

Les plaies étendues ne doivent pas être couvertes au moyen de plusieurs couches de pansement de collagène RegenePro^{MC}. Le pansement de collagène RegenePro^{MC} n'est pas prévu pour être utilisé en tant que produit de comblement osseux.

Précautions

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} ne doit pas être utilisé lorsque la zone de la plaie présente des signes apparents d'infection.

Cessez toute utilisation en cas d'apparition de rougeurs excessives, de douleur, de gonflement ou de cloquage.

Le contenu de chaque paquet est considéré comme étant stérile à moins qu'il ait été ouvert ou endommagé.

N'utilisez pas un paquet s'il est endommagé ou déjà ouvert.

Avant utilisation, vérifiez la date d'expiration imprimée sur l'emballage.

Dispositif à usage unique.

Ne pas restériliser.

Présentation

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} est présenté stérile, apyrogène et à usage unique.

Dimensions du produit







Compresse : 36 mm x 18 mm




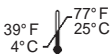

Obtrateur : bas : \varnothing 14 mm, haut : \varnothing 10 mm, hauteur : 17 mm.

Rangement

Le pansement de collagène RegenePro^{MC} doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil. Conserver entre 4 °C / 39 °F et 25 °C / 77 °F.

Explication des symboles

	Numéro de lot
	Numéro de commande
	Stérile; méthode de stérilisation : rayonnement gamma
	Date d'expiration
	Notice d'emballage incluse
	Non restérilisable

	Seulement sur ordonnance
	À usage unique
	Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
	Conserver entre 4 °C / 39 °F et 25 °C / 77 °F
	Fabricant

Distribué par

BIOMET 3iTM
PROVIDING SOLUTIONS - ONE PATIENT AT A TIME[®]

4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Téléphone : +1-800-342-5454
Hors États-Unis : +1-561-776-6700
Télécopie : +1-561-776-1272
www.biomet3i.com

Fabriqué par :
Syntacoll

Syntacoll GmbH
Donaustr. 24
93342 Saal/Donau
Allemagne
Tél. : +49 (0) 9441-6860-0
Télécopie : +49 (0) 9441-6860-30

Avertissement : la loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce produit que sur ordonnance ou sur commande d'un médecin ou d'un dentiste